

Ajutor pentru ridicarea în picioare, reglabil pe înălțime

Instrucțiuni

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru. Vă rugăm să acordați câteva minute citirii atente a acestui manual de utilizare și să îl păstrați pentru utilizare ulterioară.

1. Conținutul pachetului:

A: Ansamblu cotieră stânga (1 buc.)

B: Ansamblu cotieră dreapta (1 buc.)

C: Bară de legătură (4 buc.)

D: Picior față – cu capăt din cauciuc (2 buc.) E: Picior spate – cu ventuză (2 buc.)

G: Clemă în formă de C (4 buc.)



Pași de instalare

1. Scoateți ansamblul cotieră stânga, rotiți-l în poziția indicată în schemă și introduceți cele două cleme în formă de C în orificiile corespunzătoare.
2. Montarea este finalizată, așa cum este ilustrat în schemă.
3. Scoateți ansamblul cotierului drept, rotiți-l în poziția indicată în schemă și introduceți cele 2 cleme în formă de C în orificiile corespunzătoare.
4. Asamblarea este finalizată, așa cum se arată în schemă.
5. Împingeți ambele brațe asamblate una către cealaltă în direcția săgeților.
6. Înainte de a le împinge, apăsați butonul cu arc și, după ce le-ați împins, eliberați-l până când butonul nu mai sare.
7. Introduceți tija de legătură în tubul piciorului din față și împingeți-o în direcția săgeților.
8. Butonul cu arc va sări după introducere.
9. Introduceți ansamblurile picioarelor din față în cadrul principal în direcția săgeții.
10. Montarea ambelor picioare este finalizată, așa cum se arată în schemă.



11. Introduceți tija de legătură în tubul piciorului din spate și împingeți-o în direcția săgeților.

12. Butonul cu arc va sări după introducere.



13. Introduceți ansamblurile picioarelor din spate în cadrul principal în direcția săgeții.

14. Montarea ambelor picioare este finalizată, așa cum se arată în schemă.



16. Asamblarea produsului este finalizată așa cum se arată în schemă.



Instrucțiuni de utilizare

1. Pentru a plia produsul, îndepărtați clemele în formă de C de pe ambele părți.

2. Tuburile picioarelor pot fi reglate la înălțimea dorită.



3. Lățimea poate fi reglată apăsând butoanele cu arc.

4. Pentru instalarea produsului la toaletă, consultați în

Protecția mediului

După expirarea duratei de viață a produsului sau în momentul în care reparația ar fi neeconomică, nu aruncați produsul la gunoierul menajer. Pentru a elimina produsul în mod corespunzător, duceți-l la punctele de colectare desemnate, unde va fi preluat gratuit. Prin eliminarea corectă a produsului, contribuiți la conservarea resurselor naturale prețioase și la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea rezulta din eliminarea inc corectă a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, adresați-vă autorităților locale sau celui mai apropiat punct de colectare. În cazul eliminării necorespunzătoare a acestui tip de deșeurii, pot fi aplicate amenzi în conformitate cu legislația națională.

Service

În cazul în care după achiziționarea produsului constatați orice defect, contactați departamentul de service. La utilizarea produsului, respectați instrucțiunile din manualul de utilizare atașat. Reclamația nu va fi luată în considerare dacă ați modificat produsul sau nu ați respectat instrucțiunile din manualul de utilizare.

Garanția nu se aplică:

- uzura naturală a părților funcționale ale produsului ca urmare a utilizării acestuia
- intervențiile de service legate de întreținerea standard a produsului (de exemplu, curățarea,
- la defectele cauzate de factori externi (de exemplu, condiții climatice, praf, utilizare necorespunzătoare etc.)
- la deteriorări mecanice ca urmare a lovirii, impactului asupra produsului etc.
- pentru daunele cauzate de manipularea necorespunzătoare, supraîncărcare, utilizarea pieselor necorespunzătoare, accesorii necorespunzătoare sau instrumente necorespunzătoare etc.

În cazul produselor reclamate care nu au fost protejate corespunzător împotriva deteriorării mecanice în timpul transportului, riscul eventualelor daune revine exclusiv proprietarului.

Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica instrucțiunile de utilizare și nu răspunde pentru eventualele erori de tipar. Imaginile și descrierile pot diferi de realitate în funcție de model.